

Типы термометров для заведений по уходу за детьми

<p>Как он работает?</p>	<p>Бесконтактный термометр</p>  <p>Определяет температуру лба, измеряя инфракрасное излучение (тепловую энергию), исходящее от тела.</p>	<p>Темпоральный термометр</p>  <p>Измеряет температуру поверхности кожи в области височной артерии на голове.</p>	<p>Цифровой термометр</p>  <p>На термометр необходимо надевать одноразовый чехол при каждом измерении температуры.</p> <p>Измеряет температуру при непосредственном контакте.</p>
<p>Как его использовать?</p>	<p>Направьте на лоб</p> 	<p>Прикоснитесь к центру лба и проведите по прямой горизонтальной линии до линии роста волос.</p>  <p>Не отклоняйтесь вниз, к виску, иначе вы можете пропустить височную артерию, которая проходит в верхней части лба.</p>	<p>В подмышечной области (аксиллярный метод): установите кончик термометра так, чтобы он находился в непосредственном контакте с кожей в подмышечной впадине.</p>  <p>Во рту (оральный метод): <u>только для детей дошкольного возраста и старше.</u> Поместите кончик термометра под язык.</p> 
<p>Как чистить и дезинфицировать устройство?</p>	<p>Дезинфицируйте термометр спиртовыми салфетками перед его использованием другим человеком.</p>	<p>Дезинфицируйте термометр спиртовыми салфетками (пропитанными как минимум 70-процентным раствором спирта) после каждого измерения температуры.</p>	
<p>Нужно ли использовать перчатки?</p>	<p>Нет. Поскольку контакт с ребенком отсутствует, вам не нужно надевать перчатки или дезинфицировать термометр после измерения температуры у каждого ребенка.</p>	<p>Да. Поскольку непосредственный контакт с ребенком имеет место, по возможности используйте перчатки ИЛИ выполняйте гигиену рук после каждого измерения температуры.</p>   	
<p>Независимо от того, какой термометр вы используете, всегда следуйте инструкциям производителя.</p>			