



Tipos de Termómetros para el Cuidado Infantil

	Termómetro sin contacto	Termómetro temporal	Termómetro digital
¿Cómo funciona?	 <p>Detecta la temperatura de la frente midiendo el calor o energía infrarroja que desprende el cuerpo.</p>	 <p>Mide la temperatura de la superficie de la piel sobre la arteria temporal en la cabeza.</p>	 <p>Debe usar una cubierta de un solo uso, desechable en el termómetro cada vez que se tome la temperatura.</p> <p>Mide la temperatura por contacto directo.</p>
¿Dónde lo utilizo?	<p>Apunte a la frente</p> 	<p>Toque el centro de la frente y examine horizontalmente en línea recta hasta la línea del cabello.</p>  <p>No lo haga una curvatura hacia abajo rumbo a la sien o podría no tocar la arteria temporal, que está en la frente.</p>	<p>Bajo el brazo (método axilar): Coloque la punta del termómetro en contacto directo con la piel de la axila.</p>  <p>En la boca (método oral): <u>Se utiliza solo en niños de edad preescolar y mayores.</u> Coloque la punta del termómetro bajo la lengua.</p> 
¿Cómo se limpia y desinfecta?	<p>Utilice toallitas con alcohol para desinfectar el termómetro antes de que otra persona lo manipule.</p>	<p>Utilice toallitas con alcohol (al menos al 70%) para desinfectar el termómetro entre cada toma de temperatura.</p>	
¿Tengo que usar guantes?	<p>No. Debido a que no hay contacto con el niño, no es necesario que use guantes ni desinfecte el termómetro al medir la temperatura de cada niño.</p>	<p>Sí. Debido a que existe contacto directo con el niño, use guantes si están disponibles, O límpiense las manos cada vez que mida la temperatura.</p>   	
<p>Independientemente del termómetro que utilice, siga siempre las instrucciones del fabricante.</p>			